

Instructions d'emballage pour Infekta Pak 1 (4 pqt)

INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE (PRÉASSEMBLÉ) "INFEKTA PAK 1 (4 PQT)"

UN 4G/CLASS 6.2/**

USA/+AX4771

**Indique l'année de fabrication

MISE EN GARDE IMPORTANTE: Cette instruction d'emballage décrit l'assemblage adéquat pour ce type d'emballage. Toute dérogation à cette procédure d'emballage rendra l'emballage non conforme et annulera la certification. Le Centre de Conformité ICC Inc décline toute responsabilité lorsqu'un emballage a été utilisé avec des éléments de substitution ou lorsque l'emballage est assemblé de façon inadéquate. Si vous désirez des renseignements supplémentaires, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

RESPONSABILITÉ DE L'EXPÉDITEUR: consiste à s'assurer que les récipients internes, les bouchons, les sacs étanches, les matériaux de rembourrage ou absorbants (si pertinent) sont compatibles avec le contenu et, pour le TRANSPORT PAR AVION, que les récipients internes pour les liquides peuvent supporter une pression interne différentielle minimale de 95 kPa sans fuites. Certains liquides volatiles peuvent exiger une épreuve de pression supérieure. Consultez les Instructions Techniques de l'OACI, Partie 3, Chapitre 1, Sec. 1.1.6.1 ou la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses IATA section 5.0.2.

ÉLÉMENTS DE L'EMBALLAGE:

1. Caisse extérieure préimprimée (8-1/2" x 8-1/2" x 7-1/4")
2. Insertion en carton ondulé à 4 cavités.
3. (4) bouteilles HDPE avec bouchons à vis et joints, 1 chopine (2-1/2" x 6-1/4") 95 kPa
4. Insertion en mousse à 5 orifices (OPTIONNEL)
5. (4) Tubes pour envoi postal en carton blanc avec embout fileté, fond assemblé et bouchons en métal (3-1/8" x 6-3/8")

Instructions d'assemblage de l'emballage :

1. Retirer un ensemble tube/bouteille en plastique de la caisse.
2. Retirer la bouteille en plastique du tube.
3. Retirer le bouchon de la bouteille en plastique.
4. Placer les récipients primaires avec les matériaux de rembourrage dans la bouteille en plastique. Ajouter la matière absorbante avec les récipients primaires.
(Optionnel) Insérer l'insertion en mousse à 5 orifices dans la bouteille en plastique.
Placer les récipients primaires dans les orifices de l'insertion et ajouter la matière absorbante.
5. Bien serrer le bouchon sur la bouteille en plastique (couple de serrage 70 lbs recommandé). L'ajout d'une bande de ruban adhésif autour du bouchon est suggéré afin d'assurer la sécurité du spécimen.
6. Placer la bouteille en plastique dans le tube et bien serrer le bouchon en métal sur le tube.
7. Insérer le tube avec la bouteille dans chaque cavité de la boîte préimprimée Infekta Pak 1(4 Pqt). Ajouter du ruban adhésif sur les rabats inférieurs et supérieurs.
8. **UNE DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR EST EXIGÉE AVEC CET EMBALLAGE!**
Attacher le formulaire sur le côté de la boîte avec une enveloppe adhésive.