

Instructions d'emballage PK-INF250 (LARGE)

MATIÈRES BIOLOGIQUES, CATÉGORIE B

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA Section 5 / OACI IT Section 4)**. Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834.

Éléments de l'emballage:

Un élément


1. Boîte en carton blanche-BX-106A 11 1/4"x 6 5/8"x 3 1/2"
2. Sac primaire 9"x 12" avec la marque «Biohazard»
3. Enveloppe secondaire-sac autocollant 95 kPa 6"x 8 1/2"
4. Bande absorbante 4 1/2"x 2 1/4"




Instructions pour l'assemblage:

1. Placer les spécimens dans le sac primaire avec la bande absorbante et sceller le sac.
2. Insérer le sac primaire dans l'enveloppe secondaire et suivre les instructions de fermeture.
3. Inscrire le contenu et toutes instructions spéciales sur l'enveloppe 95 kPa.
4. Placer l'enveloppe dans la boîte blanche et fermer la boîte.
5. Suivre les instructions de fermeture de la boîte illustrée ci-dessous. (1-7)


1

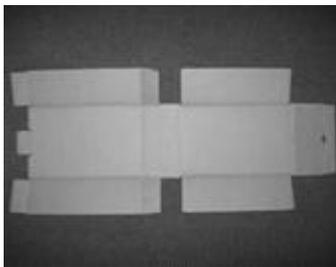


2

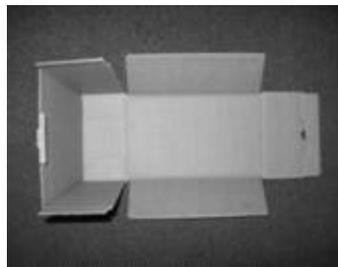


3

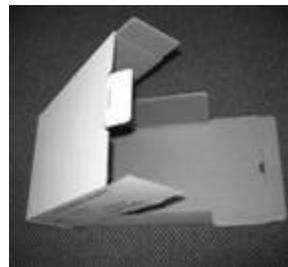

4

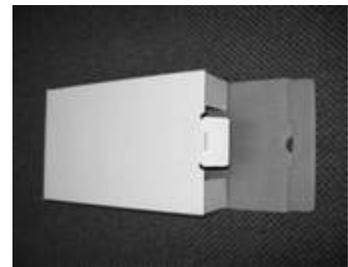

5

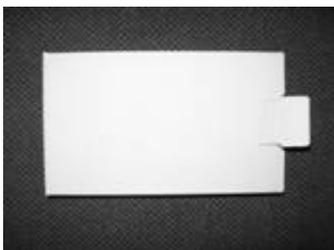

6



7

