



Instructions d'emballage PK- INFPK4 (4 x 1)

L'expéditeur doit assurer la compatibilité avec tous les matériaux d'emballage et observer tous les règlements applicables au transport. Pour le transport aérien des liquides, les contenants doivent respecter les exigences relatives à la pression, à la fermeture secondaire et à la doublure étanche. **(Voir règlement IATA Section 5 / OACI IT Section 4)**. Toute dérogation à cette procédure d'emballage peut invalider la certification ONU. Veuillez consulter le 49 CFR pour les exigences de conservation des dossiers pour les États-Unis. Si d'autres renseignements sont exigés, veuillez contacter le Centre de Conformité ICC Inc au 1-888-977-4834. **Note: Vous devez ajouter les instructions de fermeture des récipients intérieurs pour la conformité à 49 CFR Part 178.602 (e).**

Éléments de l'emballage:

1. Boîte imprimée (8-1/2" x 8-1/2" x 7-1/4") (1)
2. Pièce intercalaire en carton ondulé divisée en 4 (1)
3. (4) Bouteilles HDPE 1 chopine 95 KPA, (2-1/2" x 6-1/4") a/bouchon doublé à visser (1)
4. Pièce en mousse avec 5 orifices (EN OPTION) (1)
5. (4) Tubes d'expédition en carton blanc et bouchon à visser, et couvercle métallique (3-1/8" x 6-3/8") (1)

Instructions pour l'assemblage:

1. Enlever les tubes contenant les bouteilles en plastique du kit.
2. Enlever les bouteilles en plastique dans les tubes
3. Enlever les bouchons des bouteilles en plastique.
4. Placer les fioles primaires dans la matière de bourrage dans les bouteilles en plastique.
Insérer la matière absorbante avec les fioles primaires.
(En option)
Insérer la pièce en mousse avec 5 orifices dans les bouteilles en plastique.
Placer les fioles primaires dans les orifices de la pièce en mousse – plus matière absorbante.
5. Bien serrer les bouchons sur les bouteilles en plastique à un couple de 30po.lb.
L'ajout de ruban adhésif autour des bouchons est suggéré pour assurer la sécurité du spécimen.
6. Placer les bouteilles en plastique dans les tubes d'expédition et fixer les couvercles métalliques sur les tubes.
7. Insérer le tube d'expédition dans chaque division de la boîte préimprimée Infekta Pak 1(4/pqt). Fixer le rabat supérieur de la boîte avec du ruban gommé.
8. Une DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR EST EXIGÉ AVEC CET EMBALLAGE!
Attacher le formulaire sur le côté vierge de la boîte avec une enveloppe adhésive.